
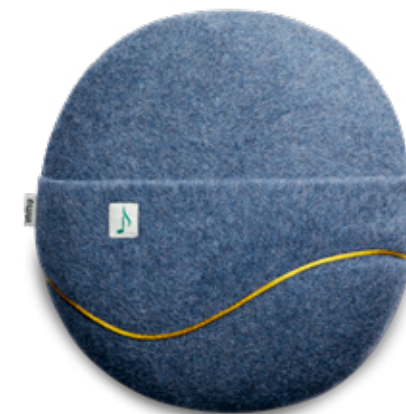


Hygiejneråd ved brug af inmuRELAX og inmuDANCE

I denne særlige tid er der ekstra fokus på god hygiejne. **inmu**'en er skabt til at blive rørt ved og være i tæt fysisk kontakt med brugeren, og derfor er den også let at vaske og vedligeholde. Vi har her lavet en oversigt over hvordan du nemt kan rengøre din **inmu**.

Vores råd til god **inmu**-hygiejne:

- Alle typer **inmu**-betræk kan tages af og vaskes i vaskemaskine eller i hånden. Følg vejledningen på betrækkets label eller find informationer på vores hjemmeside www.inmutouch.dk/support
- Vi anbefaler at du følger vaskeanvisningerne. Dog er det muligt at vaske **inmuDANCE** betræk, samt **inmuRELAX** polyesterbetræk ved 95°C*, hvis der er behov for skærpet hygiejne. (OBS! dette gælder ikke **inmuRELAX** betræk i økologisk bomuld).
*Vask ved højere temperaturer kan muligvis medføre små ændringer i betrækkets farve og kvalitet.
- Både **inmu**'ens yder- og inderbetræk kan aftørres med en fugtig klud med vand og sæbe, samt renses med en desinfektionserviet eller andre ethanolholdige midler.
- Hvis **inmu**'en anvendes af flere brugere, fx. på en institution, anbefaler vi, at tilkøbe ekstra betræk. Betrækket kan således skiftes, inden en ny bruger får **inmu**'en i hænderne.
- Det vides ikke præcist, hvor længe virus kan overleve på overflader, men det anslås, at det er fra få timer til nogle dage. Smitte kan ikke overføres alene ved at røre ved genstande med virus på. Smitte kræver, at virus kommer i kontakt med slimhinder i mund, næse eller øjne. Vi anbefaler at man følger Sundhedsstyrelsens generelle råd for at mindske smitten: <https://www.sst.dk/da/corona>.

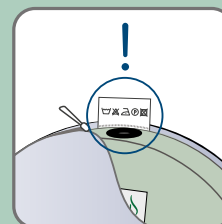

inmu
touch