

Hygienehinweise zum inmuRELAX und inmuDANCE

In dieser besonderen Zeit steht eine gründliche Hygiene im Mittelpunkt. Das **inmu** Konzept beruht auf Berührung und steht in engem physischem Kontakt mit dem Benutzer. Demzufolge ist es auch pflegeleicht und gut waschbar. Hier finden Sie eine Übersicht, wie das **inmu** einfach gereinigt werden kann.

Unsere Empfehlung für eine gründliche inmu-Hygiene:

- Alle **inmu**-Bezüge können entfernt und in der Waschmaschine oder von Hand gewaschen werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Etikett oder den Informationen auf unserer Website <https://inmutouch.com/de/support/>
- Wir empfehlen Ihnen, die Waschanleitung zu befolgen. Wenn eine erhöhte Hygiene erforderlich ist, besteht die Option **inmuDANCE**-Bezüge sowie die **inmuRELAX**-Polyesterbezüge bei 95 °C* zu waschen. (Hinweis: Dies gilt nicht für **inmuRELAX**-Bezüge aus Bio-Baumwolle.) *Das Waschen bei höheren Temperaturen kann zu geringfügigen Veränderungen der Farbe und Qualität des Bezuges führen.
- Sowohl der äußere als auch der innere Bezug des **inmu** können mit einem feuchten Tuch mit Wasser und Seife abgewischt werden. Zudem bieten sich auch Desinfektionstücher oder andere Ethanol haltige Reinigungsmittel an.
- Sollte das **inmu** von mehreren Benutzern verwendet werden, wie z.B. in einer Einrichtung, empfehlen wir den Kauf zusätzlicher Bezüge. Somit kann der Bezug gewechselt werden, bevor ein neuer Benutzer das **inmu** in die Hände bekommt.
- Es ist nicht genau bekannt, wie lange Viren auf Oberflächen überleben können, aber es wird geschätzt, dass es einige Stunden bis einige Tage sein können. Die Infektion kann nicht allein durch das Berühren von Objekten übertragen werden, auf denen das Virus vorhanden ist. Bei einer Infektion muss das Virus mit den Schleimhäuten von Mund, Nase oder Augen in Kontakt kommen. Wir empfehlen Ihnen den Rat des Gesundheitsamts zu befolgen, um das Infektionsrisiko zu reduzieren: <https://www.sst.dk/en/corona>

